

Bruksanvisning GS-357



A – Nakkepute, høydejustering

Løsne 4 skruer gult felt, juster opp eller ned

B – Sidevanger, høydejustering

Løsne 4 skruer, rødt felt

C – Sidevange, bredde venstre

Løsne 3 skruer, grønt felt

D – Sidevange, bredde Høyre

Løsne 3 skruer, blått felt

E – Justering skrittsele 5P

Vri låsen ut, trykk inn sort del for å løsne sele



F – Seleavlaster

Monteres H eller V side

G – Nakkepute, vinger

Bøy dem ut eller inn

H – Armlene høydejustering.

Skruløs 2 skruer, velg andre hull alternativer.

I – Armlene, justeringsratt.

J – Justeringspak, ryggvinkel

K – Sittedybde

Løsne 2 skruer begge sider av setet. Skli ryggen frem eller tilbake.

Skrugodt til.

L – Justeringspak, tilt sete

M – Fot-støtte, høydejustering

Løsne 2 skruer.

N – kne/lårstøtter, breddejustering

løsne 2 skruer.